

Kanylborttagare för injektionssprutor

Introduktion

Denna apparat är avsedd för avlägsnande av kanyler från injektionssprutor.

Byte av behållare

Avfallsbehållaren får fyllas med kanyler till 2/3 av burkens volym. Se markerad linje. Därefter ska den bytas ut mot en ny. Skaka behållaren regelbundet då nålarna packar sig bättre.

Skötselanvisning

- Sprita kanylborttagaren mellan varje patient.
- Smörj kanylborttagaren enligt bilden vid behov (med ex. 5-56 eller liknande). Se bild 1.
- Vi rekommenderar en mer grundlig rengöring cirka 2 gånger per år av kanylborttagaren. Doppa den i en bunke med ytdesinfektionsmedel. Låt torka innan behållaren skruvas på igen. Se bild 2.

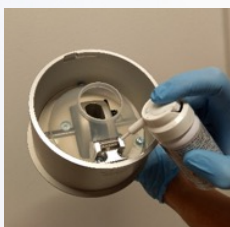


Bild 1

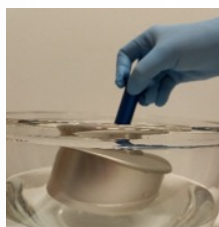


Bild 2

Om något har fastnat i kanylborttagaren.

Stoppa aldrig in fingrarna i kanylborttagaren om något från kanylen har fastnat.

Använd medföljande rensnål eller en pincett.

OBS! Plasthylsan ska ej sitta på kanylen vid användning av kanylborttagaren. Töm ej ampullens innehåll vid avlägsnande av kanyl i kanylborttagaren.

Se även instruktionsfilm på www.dandent.se

