

Skötselråd Kirurgitvättställ

Vi på Dandent är stolta och glada över att ni valt oss som leverantör och hoppas ni skall trivas med Ert Kirurgitvättställ under många år. För att säkerhetsställa en lång livslängd och att garantin skall gälla är det **viktigt** att Ni läser detta.

Dessa skötselråd syftar till att besvara dina frågor hur man sköter om ytan till ett kirurgitvättställ. För att behålla samma kvalité som vid leverans, rekommenderar vi dig att följa våra skötselråd noggrant. Då kommer ditt kirurgitvättställ behålla samma fina utseende och renlighet under lång tid.

Kirurgitvättställ

För bibehållande av produkt

När en ny yta tas i bruk är det rekommenderat att ytorna är rengjorda med tvålbaserat rengöringsmedel, som sedan tvättas bort med vatten.

Daglig/Vecko rengöring och underhåll

- Mild tvålbaserad lösning - **Dagligen**
- Universal rengöringsmedel med ett PH på 7-9 - **Dagligen/Veckovis**
- Djuprengöring (exempelvis vanlig CIF) för att ta bort fett, hudavlagringar, vattenstänk och bibehålla glans - **Vid behov**
- Slipmedel (exempelvis CIF eller annan rengöring med slipmedel i sig) i kombination med slipsvamp/duk (t.ex Scotch Brite) för att ta bort ingrodd smuts och små repor - **Vid behov**

Materialet står emot de flesta sorters rengöringsmedel/kemikalier, men kan vara bra att tänka på att starka kemikalier (t.ex färgborttagningsmedel, lösningsmedel, klor, propplösare och aceton) skall snabbt spolas av med vatten och diskmedel för att undvika skador på materialet.

Större repor kan åtgärdas genom att slipa ytan på nytt. Sandpapper med kornstorlek 180, 240 och 400 används att slipa ytan med för att sedan efter slipning försegla ytan med

Åverkan på tvättstället

Kirurgitvättstället kan repareras om det skadas av t.ex vassa eller tunga nedfallna föremål, som lämnar slagmärken eller sprickor i materialet.

Lycka till med Ert nya Kirurgitvättställ