

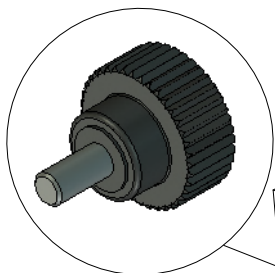


Montageanvisning för Datorvagn för en skärm

Skärmen skruvas fast med **Letterskruv**

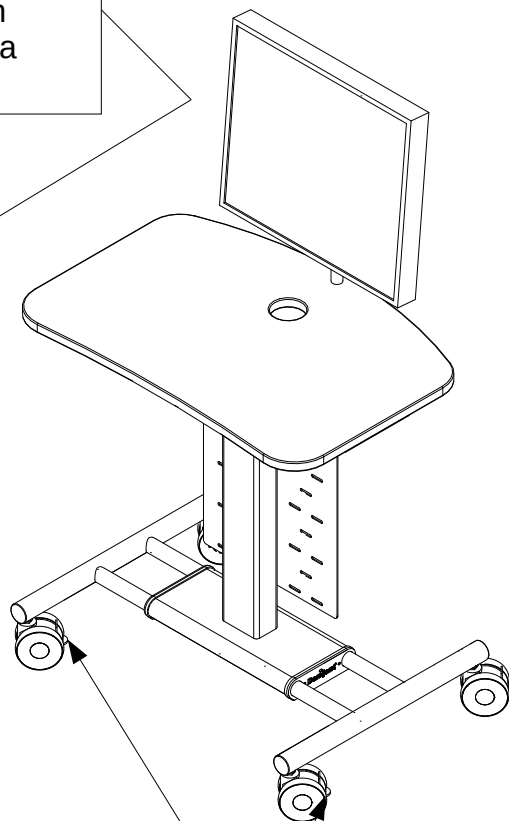


Justering av lutning på skärmen. Dra ut spaken mot den gröna knappen om spaken hamnar för nära skärmen

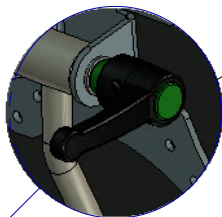

Broms på de främre hjulen

Montera datorn med de medföljande spännbanden

Justera höjden med medföljande insexnyckel

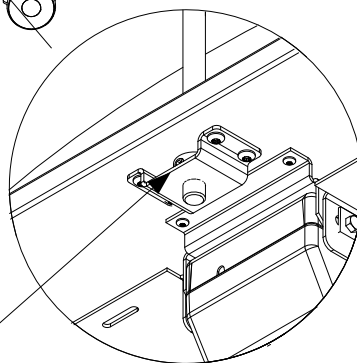

Dandent
INREDNINGAR

Inredningar för medicinska krav

Mallslingan 5, SE-187 66 Täby, Sweden

Tel +46-8-544 441 60

www.dandent.se

Skötselråd för att bevara er Dandent-datorvagn

Vi på Dandent AB är mycket glada över att ni valt vår datorvagn som är utvecklad i samarbete med ergonomer och tandvårdspersonal.



Datorbordskivan

Ytan rengörs med ytdesinfektionsmedel eller en lätt fuktig trasa som därefter torkas torr. Använd ej skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel. Thinner får ej användas.


Metallunderrede

Rengörs med ytdesinfektionsmedel eller alla i hushåll förekommande rengöringsmedel.

Montageanvisning för Datorvagn med dubbla skärmar

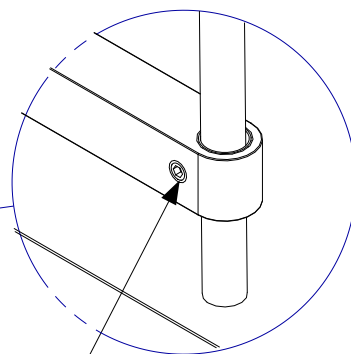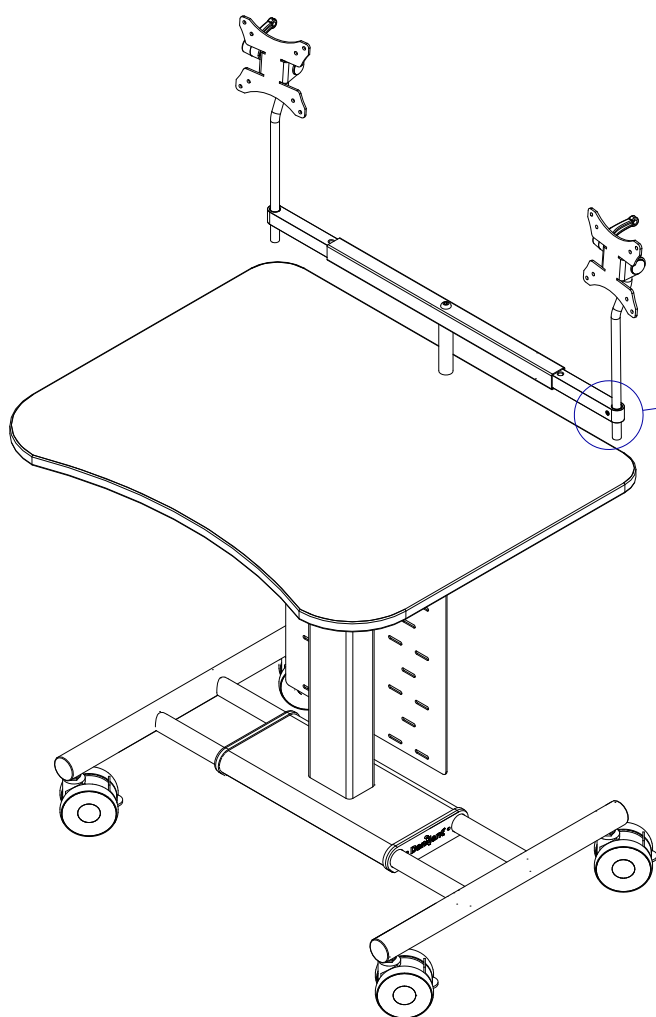

Justera höjden på
skärmen med
medföljande insexnyckel

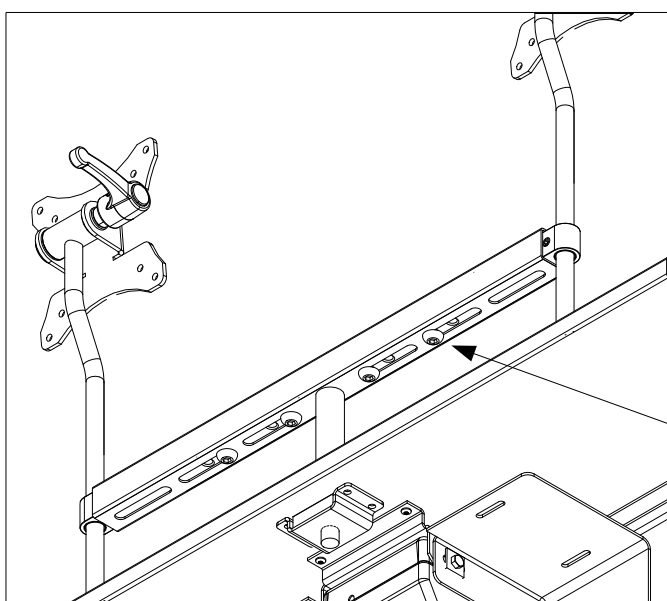

Sett bakom & underifrån

Justera avståndet mellan
skärmarna genom att lossa på
skruvarna med insexnyckel

Detta dokument och dess innehåll tillhör Dandent AB.
Innehållet får ej kopieras, reproduceras, överföras eller skickas
till tredje part, eller användas för syften som ej skriftligen godkänts.