


Montageanvisning för elektrisk Datorarm


1

Montera **Förstärkningsplattan** med vattenpass och lämplig infästningsmaterial för vägg. Därefter monteras **den ledade armen**.

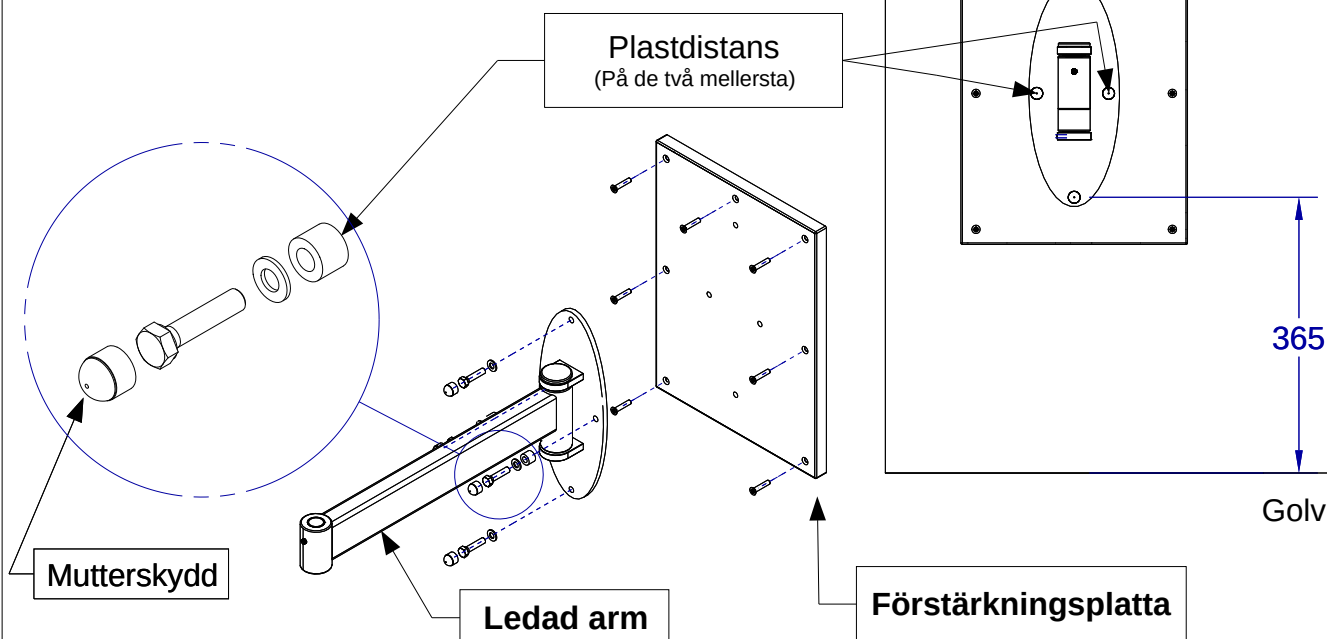

2

Montera Elarm och skivan enligt ritning

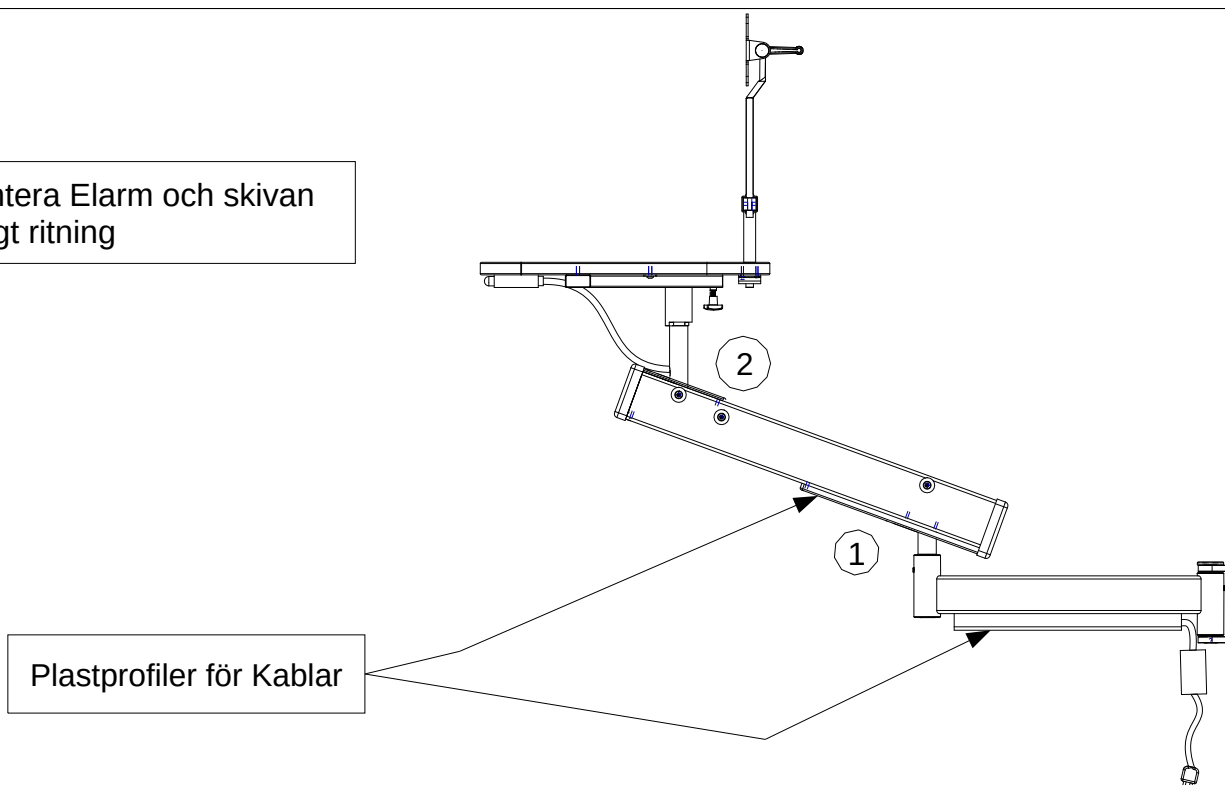

Plastprofiler för Kablar

Dandent
INREDNINGAR

Inredningar för medicinska krav

Mallslingen 5, SE-187 66 Täby, Sweden

Tel +46-8-544 441 60

www.dandent.se

Skötselråd för att bevara er Dandent-arm

Vi på Dandent AB är mycket glada över att ni valt vår datorarm som är utvecklad i samarbete med ergonomer och tandvårdspersonal.

Datorbordskivan

Ytan rengörs med ytdesinfektionsmedel eller en lätt fuktig trasa som därefter torkas torr. Använd ej skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel. Thinner får ej användas.


Ledad arm och ställbar fjäderarm

Rengörs med ytdesinfektionsmedel eller alla i hushåll normalt förekommande rengöringsmedel.


3

Montera Elreglage

Fäst knappen så att kontakten fästs innanför skivans framkant med medföljande träskruv

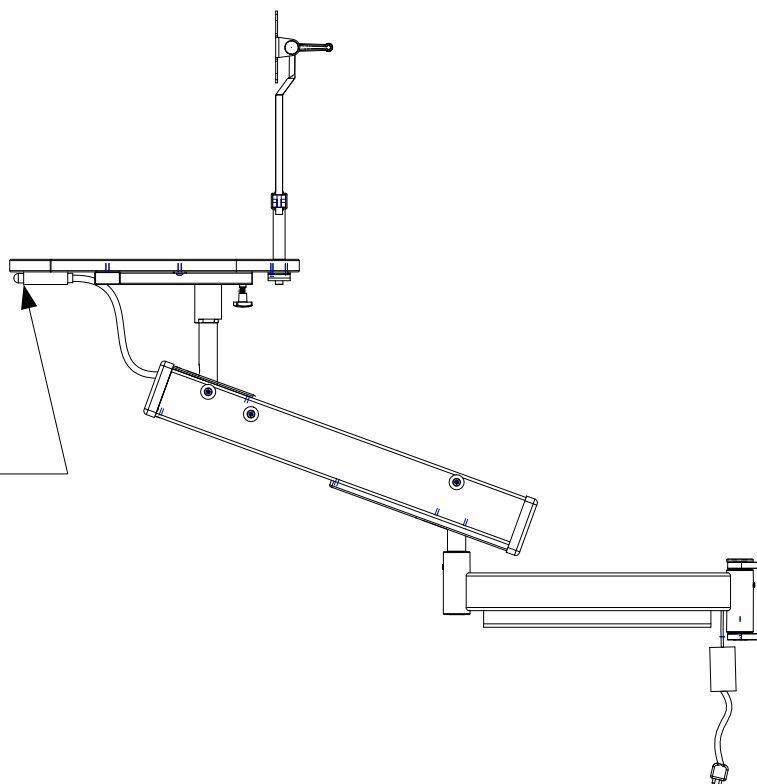


4

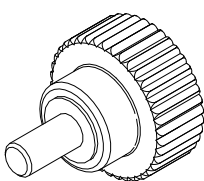

Letterskruv x4

Justerskruv
skruvas försiktigt med en 4mm insexnyckel för att justera trögheten i datorarmen

Sladdarna till datorskärm och tangentbord fixeras med plastspiral

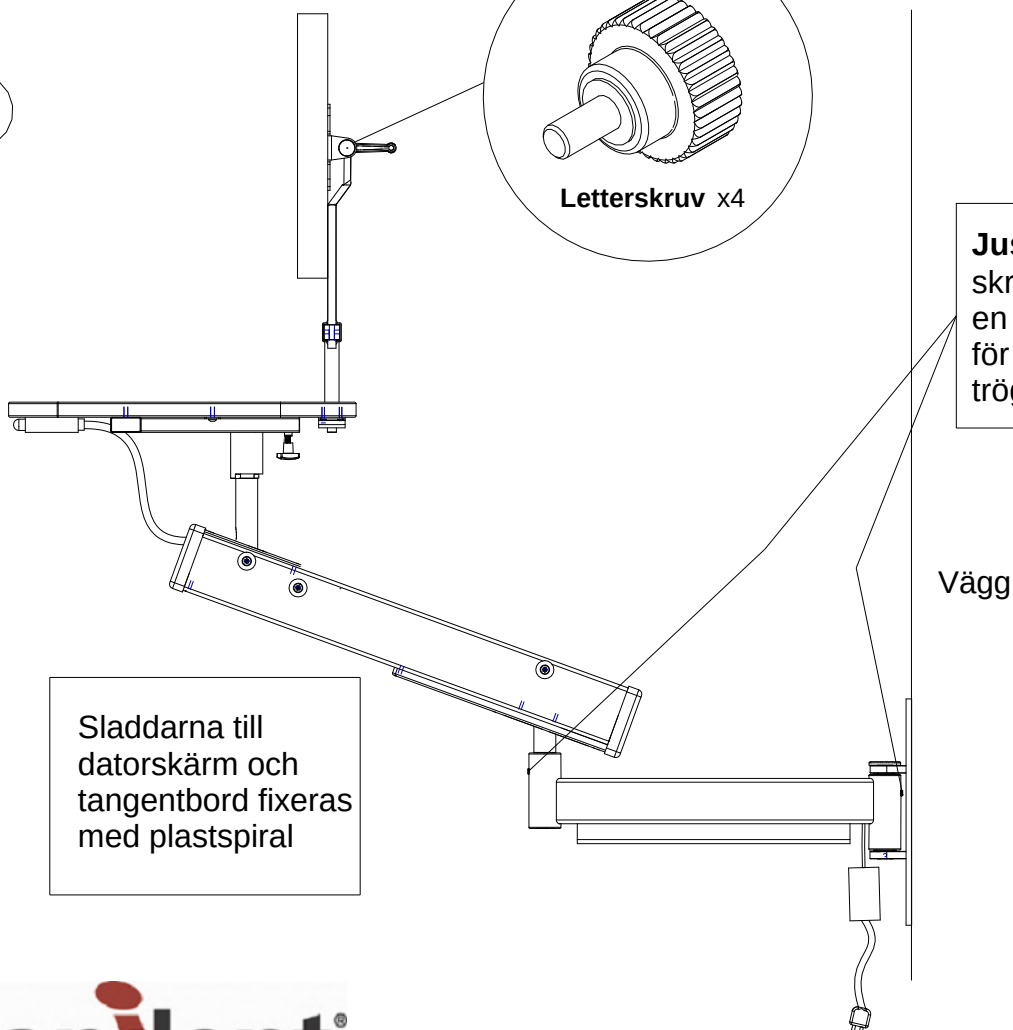

Vägg